

Opaker Acry C&B 10 ml

- vhodný na korunky, můstky, skelety, lité spony a podjazykové třmeny
- rychlé a praktické použití – materiál je namíchán v lahvičce
- zasychá na vzduchu, není třeba polymerace
- výborně přilne ke kovu
- nestírá se při běžném pracovním postupu
- vhodný pro všechny technologie výroby sedel skeletů či jiná podbarvení kovů lisováním
- velká barevná škála: A2, A3, A3,5, C2, růžová
ostatní barvy podle Vita pouze na objednávku
- v případě potřeby lze ředit Opakerem diluente,
který doporučujeme zakoupit společně s opakerem

0600001 ředidlo Opaker diluente 10 ml: **270,- Kč** s DPH



barvy VITA: **395,- Kč** s DPH

růžová: **495,- Kč** s DPH

Pracovní postup

Před použitím důkladně protřepejte lahvičku. Místo budoucí fazety (kovový povrch) opískujte, očistěte a odmastěte.

Naneste štětcem rovnoměrnou tenkou vrstvu opakeru.

- nechte zaschnout 1 min. při pokojové teplotě
- naneste další vrstvu, dokud nedojde k úplnému pokrytí
- nechte schnout ještě 10 minut při pokojové teplotě (pro důkladné zaschnutí, odpaření ředidla)
- pro případné naředění opakeru, použijte ředidlo od stejného výrobce
- pro snadnější čištění nástroje použijte ředící tekutinu.

Důležité: Ujistěte se před aplikací C+B pryskyřice, jestli opaker dobře drží, pomocí kovového nástroje (ostré hrany čepele).

Důležité: Opaker Pink nepoužívejte pod samopolymerující pryskyřici např. Acry Self a Premacryl