

Pomocník pro opravy keramiky





Původní vzhled



Finální vzhled

Rěšení pro opravy keramiky!

Dvě jedinečné výhody produktu bezpečně vedou k esteticky dokonalému výsledku.

ReVeneer je důmyslný systém, skládající se z nátěru, základní pasty a kompozita. Ve většině případů Vám uleví od nutnosti vyrábět novou korunku nebo můstek.

Systém ReVeneer nabízí jednoduché řešení s okamžitou úlevou pro zubního lékaře a pacienta: estetické, trvalé, bezpečné a bez kyselin.

Výhody systému ReVeneer

- Bez leptání kyselinou (fluorovodíkovou ani kyselinou fosforečnou)
- Bezpečný pro intraorální použití
- Žádný silan jako primer (v ústech je možná hydrolytická degradace tohoto primeru)
- Extrémně vysoká přilnavost
- Úspora času
- Lze použít univerzálně
- Testované a optimalizované na všechny běžně používané keramiky (živcovou a sklokeramickou, presovanou keramikou, zirkon)
- Možné použití konvenčních vytvrzovacích lamp (halogenové, LED, plazmové světlo)

Gerrit Meyer MDD z Univerzitní kliniky Mainz / Německo je nadšený:

„Zelená barva základní pasty se ukázala jako velmi pozitivní, neboť poskytuje příjemný kontrast proti keramice, a tak usnadňuje přesnou práci“



Protože základ systému ReVeneer je zelená barva, jsou možné přesné aplikace. Změna barvy ze zelené na čirou ukazuje, kdy je tvrdění kompletní.

Oprava keramiky v praxi s ReVeneer systémem Klinický případ poškozené korunky

1 Původní vzhled



2 Zdrsnění



Zdrsnění povrchu jemným diamantem

3 Použití ReVeneer Primer



Doba schnutí je dvě minuty

4 Použití ReVeneer Opaquer




Použití a vytvrzení první tenké vrstvy

5 Použití ReVeneer Opaquer



Použití druhé vrstvy

6 Vytvrzovací čas: 60 - 90 sekund

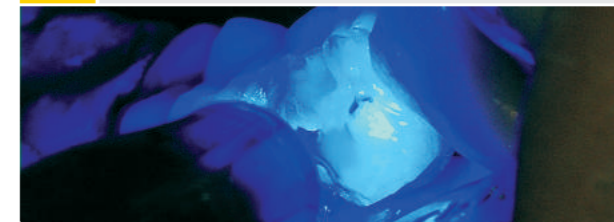

7 Použití ReVeneer Base



8 Aplikace ReVeneer Base štětečkem



9 Vytvrzovací čas: 60 - 90 sekund



Po vytvrzení: Aplikace fotokompozita dle instrukcí

10 Finální vzhled



Po vyleštění obnoveného fotokompozita

Poznámka: Toto není návod k použití. Dodržujte pokyny v návodu dodávaném s tímto materiálem. Odpovědnost za zákrok zůstává na ošetřujícím zubním lékaři.

Balení systému ReVeneer

Set

Kat.č.	Popis	Obsah
232205	ReVeneer Adhesive Set	1 injekční stříkačka (1g) ReVeneer base 1 lahvička (3 ml) ReVeneer primer 12 aplikačních špiček (0,9 x 13 mm) 1 držák kartáčku 6 jednorázových kartáčků

Doplňková balení

Kat.č.	Popis	Obsah
232210	ReVeneer base	1.0 g
322211	ReVeneer primer	3.0 ml



MANI SCHÜTZ
DENTAL

CompleteDental
realizace a zásobování zubních laboratoří

Complete Dental s.r.o.

Provozovna: Sulkovská 80, 569 92 Bystré
tel.: 461 741 450, mobil: 773 980 491
objednávky: sklad@completdental.cz

Sídlo: Příkop 838/6, 602 00 Brno – Zábřovice

www.completdental.cz eshop.completdental.cz